

Bruder.
EyeCompress
MOIST HEAT
Bruder.
Masque Oculaire
CHALEUR HYDRATANTE

PROFESSIONAL MODEL
MODÈLE PROFESSIONNEL

- ◆ Microwave Activated
Activation au four à micro-ondes
- ◆ Naturally Hydrating
Naturellement hydratant
- ◆ Washable & Reusable
Lavable et réutilisable
- ◆ Anti-Bacterial
Antibactérien
- ◆ Non-Allergenic
Hypoallergénique

Follow doctor's recommendations for use.
Suivre les conseils de votre médecin avant utilisation

CONSEILS

Assurez-vous que votre four à micro-ondes est vide. La plaque tournante peut rester. Afin de maintenir votre masque propre, placez le sur une assiette propre.

Après le soin votre vision peut être floue car vos glandes relâchent des sécrétions bénéfiques. Votre vision s'éclaircira après quelques minutes.

Il n'est pas nécessaire de serrer le masque sur vos yeux. Il peut être utilisé sans le bandeau.

UN

20 secondes au four à micro-ondes
Pour augmenter la température,
chauffez par fraction de 5 secondes
supplémentaires **NE PAS DEPASSER**
30 secondes au total.

DEUX

Toujours vérifier la chaleur du masque
avant de le poser sur vos paupières.

Si le masque est trop chaud retirez le
Immédiatement et attendez 1 à 2
minutes avant de le remettre en place.

TROIS

Appliquez le masque sur vos yeux
fermés pendant 10 min ou selon la
prescription de votre médecin.

Si vous réchauffez votre masque dans
les 30 minutes, divisez le temps de
chauffe par 2.

LAVAGE

Attendez 2 h après utilisation. **LAVAGE A LA MAIN**
UNIQUEMENT, à l'eau froide avec un savon naturel.

Laissez sécher au minimum 24 h avant de le refaire
Chauffer. Lavez votre masque s'il a été en contact avec du
Maquillage, de la crème, de l'huile ou de la nourriture.

Si vous l'utilisez quotidiennement, pensez à remplacer
votre masque après 6 mois.

MASQUE OCULAIRE CHAUFFANT
HYDRATANT BRUDER

Application rapide pour un soin chauffant hydratant
en profondeur. Suivre les conseils de votre médecin.
Instructions d'entretien à l'intérieur . Contient un
masque binoculaire



Bruder Better.
By Design.



Medoxys S.A.
Rue Beussart, 50
1495, Marbais
Belgium

Importé et distribué par

 **Medoxys**

www.mesyeuxsecs.be