

**Bruder.**  
**EyeCompress**  
MOIST HEAT  
**Bruder.**  
**Masque Oculaire**  
CHALEUR HYDRATANTE

**PROFESSIONAL MODEL**  
**MODÈLE PROFESSIONNEL**

- ◆ Microwave Activated  
Activation au four à micro-ondes
- ◆ Naturally Hydrating  
Naturellement hydratant
- ◆ Washable & Reusable  
Lavable et réutilisable
- ◆ Anti-Bacterial  
Antibactérien
- ◆ Non-Allergenic  
Hypoallergénique

*Follow doctor's recommendations for use.  
Suivre les conseils de votre médecin avant utilisation*

**ADVIES**

Zorg ervoor dat uw magnetron leeg is. De draaischijf mag erin blijven zitten. Om uw masker schoon te houden, legt u het op een schoon bord.

Na de behandeling kan uw zicht wazig zijn omdat uw klieren weldoende afscheidingen afgeven. Uw zicht zal na enkele minuten weer helder worden.

Het is niet nodig om het masker strak om uw ogen te drukken. Het kan zonder de hoofdband worden gebruikt.

**EEN**

20 seconden in de magnetron.  
Om de temperatuur te verhogen, verwarm in stappen van 5 seconden extra. **OVERSCHRIJD NIET** de totale tijd van 30 seconden.

**TWEE**

Controleer altijd of het masker niet te warm is voordat u het op uw oogleden legt.

Als het masker te warm is, haal het dan onmiddellijk weg en wacht 1 à 2 minuten voordat u het weer oplegt.

**DRIE**

Breng het masker aan op uw gesloten ogen en laat het 10 minuten inwerken, of volgens het voorschrift van uw arts.

Als u uw masker binnen 30 minuten opnieuw opwarmt, halveer dan de opwarmtijd.

**WASSEN**

Wacht 2 uur na gebruik. **ALLEEN MET DE HAND WASSEN**, met koud water en natuurlijke zeep.

Laat het minstens 24 uur drogen voordat u het opnieuw opwarmt. Was uw masker als het in contact is gekomen met make-up, crème, olie of voedsel.

Als u het dagelijks gebruikt, denk er dan aan om uw masker na 6 maanden te vervangen.

**VERWARMEND OOGMASKER**  
**HYDRATEREND BRUDER**

Snelle toepassing voor een diepgaande, verwarmende en hydraterende verzorging. Volg het advies van uw arts. Onderhoudsinstructies binnenin. Bevat een binoculair masker.



**Bruder** Better.  
By Design.



Medoxys S.A.  
Rue Beussart, 50  
1495, Marbais  
Belgium

Geïmporteerd en gedistribueerd door

 **Medoxys**

[www.mesyeuxsecs.be](http://www.mesyeuxsecs.be)