

Bruder.
EyeCompress
MOIST HEAT
Bruder.
Masque Oculaire
CHALEUR HYDRATANTE

PROFESSIONAL MODEL
MODÈLE PROFESSIONNEL

- ◆ Microwave Activated
Activation au four à micro-ondes
- ◆ Naturally Hydrating
Naturellement hydratant
- ◆ Washable & Reusable
Lavable et réutilisable
- ◆ Anti-Bacterial
Antibactérien
- ◆ Non-Allergenic
Hypoallergénique

*Follow doctor's recommendations for use.
Suivre les conseils de votre médecin avant utilisation*

Hinweise zur Anwendung

Stellen Sie sicher, dass Ihre Mikrowelle leer ist. Der Drehteller kann darin bleiben. Um Ihre Maske sauber u halten, legen Sie sie auf einen sauberen Teller.

Nach der Behandlung kann Ihre Sicht verschwommen sein, da Ihre Drüsen wohltuende Sekrete absondern. Ihre Sicht wird sich nach einigen Minuten wieder klären. Es ist nicht notwendig, die Maske fest an Ihre Augen zu drücken. Sie kann auch ohne das Stirnband verwendet werden.

EINE

20 Sekunden in der Mikrowelle
Um die Temperatur zu erhöhen,
erwärmen Sie in Schritten von jeweils 5 Sekunden.
Überschreiten Sie dabei NICHT
insgesamt 30 Sekunden.

ZWEI

Überprüfen Sie immer die Temperatur der Maske,
bevor Sie sie auf Ihre Augenlider legen.

Wenn die Maske zu heiß ist, nehmen Sie sie
sofort ab und warten Sie 1 bis 2
Minuten, bevor Sie sie wieder auflegen.

DREI

Legen Sie die Maske auf Ihre geschlossenen
Augen und lassen Sie sie 10 Minuten lang oder
emäß der Anweisung Ihres Arztes einwirken.

Wenn Sie Ihre Maske innerhalb von
30 Minuten erneut erwärmen
halbieren Sie die Erwärmungszeit.

LAVAGE

Warten Sie nach dem Gebrauch 2 Stunden. NUR
VON HAND WASCHEN, mit kaltem Wasser un
einer natürlichen Seife.

Lassen Sie die Maske mindestens 24 Stunden trocknen,
bevor Sie sie erneut erwärmen. Waschen Sie Ihre Maske,
wenn sie mit Make-up, Creme, Öl oder Lebensmitteln
in Kontakt gekommen ist.
Wenn Sie sie täglich verwenden, denken Sie daran,
Ihre Maske nach 6 Monaten zu ersetzen.

BEHEIZBARE AUGENMASKE
FEUCHTIGKEITSSPENDEND

Schnelle Anwendung für eine tiefenwirksame, beheiz-
bare Feuchtigkeitspflege. Befolgen Sie die Anweisun-
gen Ihres Arztes. Pflegehinweise finden Sie im Inneren.
Enthält eine binokulare Maske.



Bruder Better.
By Design.



Medoxys S.A.
Rue Beussart, 50
1495, Marbais
Belgium

Importiert und vertrieben von

 **Medoxys**

www.mesyeuxsecs.be